


# ザルコニン<sup>®</sup>N消毒液0.1

折りたたんで廃棄し  
やすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容  
後の容積は約 $\frac{1}{4}$ になります。

- ①折り目に沿ってつぶす。
- ②空気が入らないよう、キャップをしめる。

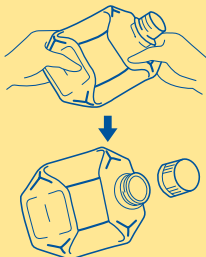

キャップ：PP  
パッキン：PE,PP  
ボトル：PE  
ラベル：PE

折り目

# 0.1

開封日

年 月 日

※医療機器殺菌消毒剤

# ザルコニン<sup>®</sup>N消毒液0.1

※防錆剤添加 0.1%ベンザルコニウム塩化物液



貯法：気密容器  
室温保存  
注意：「取扱い上の注意」  
の項参照

健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

# ザルコニン<sup>®</sup>N消毒液0.1

※2008年7月改訂（第2版）  
2002年2月作成

日本標準商品分類番号 877324

承認番号	(13AM)829
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2002年2月

## ザルコニン<sup>®</sup>N消毒液 0.1

※〔組成・性状〕

※〔組成〕100mL中

ベンザルコニウム塩化物 0.1g含有(0.1w/v%)。  
添加物として亜硝酸ジシクロヘキシルアミン、エタノール、炭酸水素ナトリウム、プロピレングリコールを含有する。

〔性状〕

防錆剤として亜硝酸ジシクロヘキシルアミンを0.5w/v%、防腐剤としてエタノールを8vol%含有する無色～淡黄色澄明の液で、特異なおいがある。

※〔効能・効果〕医療機器の殺菌・消毒

〔用法・用量〕

歯科用小器具の消毒の場合、本品に10分間浸漬する。  
高度に汚染された器具の厳密な消毒を行う場合は、あらかじめ2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後本品中で15分間煮沸する。

〈調剤包装単位用コード〉



011111101111

〈販売包装単位用コード〉



011111101111

折り目

# ザルコニン<sup>®</sup>N消毒液0.1

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

- (1)人体には使用しないこと。
- (2)眼に入らないように注意すること。  
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (3)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
過敏症：接触により発疹、痒痒感等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4. 適用上の注意

(1)使用時：

- 1)血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用する。
- 2)石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。

(2)器具等材質：

- 1)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル及び錆鉄、マグネシウム、カドミウム、鉛、亜鉛等を含有する製品への使用は避けることが望ましい。
- 2)皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。

〔薬効薬理〕

本剤は使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、一部の真菌等には有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

〔取扱い上の注意〕

〔注意〕

- (1)使用中に本剤が変色又は混濁した時は、効果が減弱するので、速やかに取換えることが望ましい。
- (2)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。

®登録商標